

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES

Instruments orthodontiques réutilisables – D-00958 REV-0

• Falcon Orthodontic Instruments®

• Instruments orthodontiques X7®

COORDONNÉES DU FABRICANT :

Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U.

Téléphone : +1-813-501-1650
Site Web : www.orthotechnology.com

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nom : Instruments orthodontiques réutilisables

Description : Les instruments orthodontiques sont des pinces, des coupe-fils et des instruments à main, fabriqués à partir d'un mélange d'acier inoxydable, à utiliser pendant un traitement dentaire ou orthodontique pour ajuster ou manipuler les fils ou les appareils orthodontiques. Les instruments orthodontiques sont fournis non stériles et doivent être stérilisés avant chaque utilisation.

TABLEAU DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE : Consulter le lien de l'annexe ici.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirer l'instrument de son emballage.
 2. Utiliser l'instrument qui convient au plan de traitement prescrit par le professionnel dentaire ou l'orthodontiste.
 3. Stériliser l'instrument avant chaque utilisation selon les instructions de réutilisation comprises dans ces instructions d'utilisation.
- Une formation orthodontique aux interventions standards permettra de déterminer quels sont les instruments appropriés à utiliser lors de la pose et du retrait des appareils.
 - L'hygiène buccale revêt une importance particulière pour les patients immunodéprimés. Il faut surveiller de près l'hygiène buccale des patients immunodéprimés.
 - Évaluer si un traitement orthodontique supplémentaire est souhaitable en présence d'une résorption radiculaire.
 - Recommandé pour être utilisé avec d'autres produits Ortho Technology.

INFORMATIONS GÉNÉRALES À L'INTENTION DU DENTISTE OU DE L'ORTHODONTISTE

- Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de traitement, et avant la mise en place de l'appareil, évaluer la nécessité d'une coordination interdisciplinaire avec d'autres professionnels, tels que des orthophonistes, des oto-rhino-laryngologistes, des médecins généralistes, des dentistes ou des orthodontistes.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX :

Marque des instruments réutilisables			
Falcon Orthodontic Instruments	Falcon	Falcon	Falcon
Instruments orthodontiques X7	X7	X7	X7
Élément	Acier inoxydable 410	Acier inoxydable 425	Acier inoxydable 430
C (carbone)	0,15 %	0,54 %	0,12 %
Cr (chrome)	11,5 à 13,5 %	0,15 %	18,00 %
Mn (manganèse)	1,00 %	0,50 %	1,00 %
Mo (molybdène)	–	0,10 %	–
Ni (nickel)	0,75 %	–	0,50 %
P (phosphore)	0,04 %	0,04 %	0,04 %
S (soufre)	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Si (silicium)	1,00 %	0,80 %	1,00 %
V (vanadium)	–	0,10 %	–

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES

Instruments orthodontiques réutilisables – D-00958 REV-0

UTILISATEURS CONCERNÉS

Les instruments orthodontiques ne doivent être utilisés que par des professionnels dentaires agréés ou des orthodontistes pendant un traitement orthodontique.

POPULATION DE PATIENTS CONCERNÉE

Les instruments orthodontiques peuvent être utilisés sur tout patient envisageant un traitement dentaire ou orthodontique.

UTILISATION PRÉVUE

Les instruments orthodontiques ne doivent être utilisés que par des professionnels dentaires agréés ou des orthodontistes pendant un traitement orthodontique.

INDICATIONS D'UTILISATION

Les instruments orthodontiques sont destinés à être utilisés pendant un traitement dentaire ou orthodontique pour ajuster ou manipuler les fils ou les appareils orthodontiques.

CONTRE-INDICATIONS

- Ils sont contre-indiqués chez les patients présentant une hypersensibilité allergique au nickel ou au chrome.

AVERTISSEMENTS

- Cet instrument contient des métaux qui peuvent produire de la chaleur et des artefacts d'image au niveau ou à proximité des brackets lors d'imagerie par résonance magnétique.
- Ce produit contient du nickel et du chrome ; il ne doit pas être utilisé chez les individus présentant une hypersensibilité allergique connue à ces métaux.
- Ce produit contient du nickel et du chrome, produits chimiques reconnus en Europe et dans l'État de Californie comme cancérigènes.
- Les instruments orthodontiques à main sont fournis non stériles et doivent être stérilisés avant chaque utilisation.

RISQUES RÉSIDUELS

- Faire bien attention aux extrémités tranchantes des instruments et au pincement qui peut se produire au niveau des charnières.

PRÉCAUTIONS

- La durée de vie du produit est de trois ans après la date de fabrication.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou a été ouvert par mégarde.
- Ne pas utiliser les produits qui sont endommagés ou qui ne sont pas conformes aux spécifications de l'étiquetage.
- Il incombe à l'utilisateur d'inspecter les instruments avant chaque utilisation et il assumera l'entière responsabilité s'il utilise des instruments endommagés et sales (Ortho Technology se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect de cette consigne).

ATTENTION

- Si le patient présente une réaction allergique, retirer immédiatement l'auxiliaire et conseiller au patient de consulter un médecin.
- La durée de vie des instruments dépend de la fréquence d'utilisation, de l'entretien apporté par l'utilisateur et de l'utilisation de méthodes de retraitement appropriées.

EFFETS SECONDAIRES

Bien qu'ils soient rares, l'utilisation de ce dispositif peut entraîner des effets secondaires tels qu'une irritation des tissus mous ou une douleur buccale après utilisation.

AVANTAGES CLINIQUES

Les instruments offrent une coupe ou un pliage sûrs et efficaces des fils d'arc, des ligatures, des tenons en fil souple ou des élastiques, ou le retrait ou la manipulation des appareils orthodontiques (brackets, bagues, tubes buccaux) pendant un traitement orthodontique.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Les instruments orthodontiques sont utilisés pendant un traitement orthodontique pour ajuster ou manipuler les fils ou les appareils.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES

Instruments orthodontiques réutilisables – D-00958 REV-0

RÉUTILISATION

Nettoyage

- La qualité de l'eau influencera le résultat du nettoyage et de la désinfection des instruments. La corrosion peut être due à une concentration élevée en chlorure ou à d'autres minéraux présents dans l'eau du robinet. Si vous avez des problèmes de corrosion ou de taches et que toute autre raison a été exclue, une analyse de l'eau du robinet est de mise. En utilisant de l'eau complètement déionisée ou distillée, la plupart des problèmes de qualité de l'eau peuvent être évités.
- Nettoyer et enlever tout gros débris immédiatement après utilisation. Il n'est pas conseillé d'utiliser un lavage automatisé. Ne pas nettoyer les instruments avec des brosses métalliques ou de la laine de verre. Pour le nettoyage des instruments, il est conseillé d'utiliser une solution de nettoyage enzymatique avec un antirouille et de l'eau déionisée ou distillée dans un laveur à ultrason. Utiliser des détergents et des désinfectants prévus pour les instruments médicaux et dentaires. Suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne la concentration et la durée d'exposition. Suivre la durée de traitement indiquée par le fabricant du détergent ou du système ultrasonique. La solution ultrasonique doit être changée tous les jours. Les instruments comportant une charnière doivent être nettoyés et stérilisés en position ouverte.
- La procédure standard de nettoyage est la suivante : Faire tremper les instruments pendant le temps recommandé dans la solution de nettoyage en s'assurant que les instruments sont complètement immergés. Remarque : Les instruments ne doivent pas se toucher. Le cas échéant, rincer toutes les lumières de l'instrument cinq fois au début et à la fin du temps de trempage imparti, à l'aide d'une seringue à usage unique (volume minimal de 50 mL). Pour un système à cassette, la durée de nettoyage par ultrason doit être d'au moins 16 minutes, à moins qu'une durée d'exposition plus longue soit requise par le fabricant du détergent. Ne pas surcharger le laveur.

Retirer les instruments de la solution de nettoyage, puis les rincer abondamment avec de l'eau déionisée ou distillée. Inspecter les instruments pour vérifier qu'ils sont bien nettoyés. Sécher avec soins les points de jonction et les extrémités à l'aide d'air comprimé ou d'un chiffon afin d'enlever toute trace d'humidité. Lubrifier les points de jonction des instruments.

Lubrification

- Pour prolonger la durée de vie des instruments, il est recommandé de les lubrifier régulièrement. Lubrifier les instruments avant de les stériliser et après les avoir nettoyés. La lubrification doit être faite au moins une fois par semaine. N'utiliser que des lubrifiants conçus pour les instruments de précision à charnière.

Inspection

- Inspecter tous les instruments après le nettoyage et le rinçage afin de repérer toute trace de corrosion, toute surface endommagée ou toute trace de saleté. Ne pas utiliser les instruments endommagés. Si les instruments sont encore sales, les nettoyer de nouveau. Au besoin, les aiguïser. Enlever tout résidu produit durant l'affûtage, comme les résidus métalliques ou huileux.

Affûtage

- Un affûtage régulier du coupe-fil augmentera sa durée d'utilisation et le rendra plus coupant. La fréquence de l'affûtage dépend de la fréquence d'utilisation ainsi que des types et diamètres des fils coupés. Vérifier régulièrement les coupe-fils pour voir s'il est nécessaire de les affûter. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les services d'un affûteur professionnel.

Stérilisation

- Les instruments sont conçus pour être stérilisés à l'autoclave à vapeur. En effet, ce dernier n'émousse pas les coupe-fils.
- Ouvrir les instruments avant de les mettre dans l'autoclave. Lors de la stérilisation, il est recommandé d'utiliser des poches ou des cassettes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES**Instruments orthodontiques réutilisables – D-00958 REV-0**

- Utiliser de l'eau déionisée ou distillée pour la stérilisation.
- La stérilisation à la vapeur s'effectue comme suit :

Type	Température	Durée minimale	Durée de séchage
À déplacement de gravité	121 °C (250 °F)	30 minutes	30 minutes
Évacuation d'air dynamique (pré-vide)	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes

Stockage

- Après stérilisation, conserver les instruments dans un endroit sec et sans poussière dans une zone propre de la station de traitement des instruments. La stérilisation ne se maintiendra que si les instruments sont mis sous boîte ou

emballés de manière à les rendre imperméables aux micro-organismes (suivre les normes en vigueur). Indiquer clairement sur les emballages ou les boîtes que les instruments sont stériles.

ÉLIMINATION

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales, régionales et nationales relatives aux substances biologiques en vigueur.

SECTION DE SIGNALEMENT D'UN INCIDENT GRAVE

Si, pendant l'utilisation de cet appareil ou à la suite de son utilisation, un incident grave se produit ou un problème de performance du produit est observé, veuillez le signaler au fabricant ou à son représentant agréé ou à votre filiale locale, ainsi qu'à votre autorité nationale.

COMMANDER UNE COPIE PAPIER GRATUITE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES (eIFU)


Par Internet : Il faut avoir un accès Internet pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Aller sur ifu.orthotechnology.com.
3. Rechercher « Request a Printed Copy of the Instructions for Use » (demande d'une copie papier des instructions d'utilisation).
4. Remplir le formulaire en complétant les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où recevoir la copie papier des instructions d'utilisation. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.



Par téléphone : Il faut avoir accès à un téléphone pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Composer le **+1-813-501-1650** pendant les heures normales de l'Est listées ci-dessous :
Du lundi au jeudi – 9 h à 17 h 30
Vendredi – 9 h à 15 h
Samedi et dimanche – Fermé
3. Composer le numéro et suivre les instructions de l'opérateur.
4. Remplir les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où envoyer la copie papier des instructions d'utilisation du formulaire. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.

Pour le glossaire des symboles, se rendre sur : ifu.orthotechnology.com.



Fabriqué pour :
Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U.
1-813-501-1650 • www.orthotechnology.com















Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
Pays-Bas

ATTENTION : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu qu'à un dentiste ou un orthodontiste ou sur prescription de ce dernier.

Les informations contenues dans ces instructions d'utilisation sont jugées exactes. Toutefois, Ortho Technology, Inc. ne donne aucune garantie expresse ou implicite, concernant l'exhaustivité des informations dans toutes les conditions possibles. Toujours prendre des précautions de sécurité raisonnables.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

SYMBOLE	ÉNONCÉ DU SYMBOLE	DESCRIPTION DU SYMBOLE
	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical tel que défini dans les directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	Date de fabrication	Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.
	Numéro de lot	Indique le numéro de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	Numéro de catalogue	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
	Ne pas réutiliser.	Indique un dispositif médical à usage unique, conçu pour un seul patient au cours d'une seule intervention.
	Consulter les instructions d'utilisation	Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions d'utilisation.
	Attention	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation afin d'obtenir des informations de mises en garde importantes telles que des avertissements et des précautions qui ne peuvent, pour diverses raisons, être présentées sur le dispositif médical lui-même.
	Dispositif médical	Indique que le produit est un dispositif médical.
	Sur ordonnance uniquement	Attention : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur prescription de celui-ci.
	Conformité européenne	Le marquage CE indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
	Dangereux en environnement de résonance magnétique	Un article qui présente des risques inacceptables pour le patient, le personnel médical ou d'autres personnes dans l'environnement de la résonance magnétique.

Instruments réutilisables – Numéros de référence

Ortho Technology, Inc.
1 Southern Court, West Columbia, SC 29169 É.-U.
Site Web : www.orthotechnology.com

Dernière mise à jour : 28/01/2022

Nom du produit	RÉF.	Description du produit
Falcon Orthodontic Instruments	800-101	Coupe-fil pour extrémité distale Falcon (avec retenue fragments)
Falcon Orthodontic Instruments	800-101XL	Coupe-fil pour extrémité distale Falcon (avec retenue fragments) – manche long
Falcon Orthodontic Instruments	800-103	Coupe-fil pour fil dur Falcon, angle de 15°
Falcon Orthodontic Instruments	800-105	Coupe-fil multi-usage Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-107	Micro coupe-fil pour tenon et ligature Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-107XL	Micro coupe-fil pour tenon et ligature Falcon – manche long
Falcon Orthodontic Instruments	800-109	Micro coupe-fil pour tenon et ligature Falcon, angle de 15°
Falcon Orthodontic Instruments	800-110	Micro coupe-fil Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-111	Coupe-fil pour extrémité distale avec retenue fragments et coupe à ras Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-202	Pince de Weingart Falcon (avec mors fins)
Falcon Orthodontic Instruments	800-203	Pince de How Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-206	Pince à retirer l'adhésif Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-207	Pince pour retirer les bagues postérieures Falcon – longue
Falcon Orthodontic Instruments	800-213	Pince pour retirer les brackets à collage direct Flacon
Falcon Orthodontic Instruments	800-219	Pince de décollement Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-220XL	Pince de décollement angulée Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-221	Pince de profilage couronne et bague Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-301	Pince de Jarabak Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-302	Pince à trois becs Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-304	Pince bec d'oiseau Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-305	Pince bec d'oiseau pour arcs légers Falcon, avec rainure
Falcon Orthodontic Instruments	800-306	Pince de Tweed pour former les boucles Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-307	Pince à plier l'arc Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-309	Pince pour former l'arc lingual Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-310	Pince à former les arcs « Hollow Chop » Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-312	Mini pince à trois becs Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-318	Pince bec d'oiseau pour arcs légers Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-319	Pince de Nance pour former les boucles Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-320	Pince d'Adams Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-321	Pince pour stop Falcon (butée en V)
Falcon Orthodontic Instruments	800-323	Pince de type optique Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-325	Pince bec d'oiseau/coupante Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-328	Pince pour boucle « tie-back » Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-329	Pince à ajustements Falcon, 0,50 mm
Falcon Orthodontic Instruments	800-330	Pince à ajustements Falcon, 0,75 mm
Falcon Orthodontic Instruments	800-331	Pince à ajustements Falcon, 1 mm
Falcon Orthodontic Instruments	800-332	Pince à sertir les crochets (droite)
Falcon Orthodontic Instruments	800-333	Pince à sertir les crochets (angulée)
Falcon Orthodontic Instruments	800-334	Pince utilitaire pour arcs Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-335	Pince utilitaire angulée pour arcs Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-336	Pince utilitaire à ajustements Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	800-337	Pince pour couple de torsion Falcon avec clé
Falcon Orthodontic Instruments	800-338	Petit coupe-fil pour extrémité distale Falcon (avec retenue fragments) – manche long
Falcon Orthodontic Instruments	801-011	INSERT DE RECHANGE EN SILICONE POUR RETENUE FRAGMENTS (3) Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	801-206B	LAME DE RECHANGE POUR PINCE À RETIRER L'ADHÉSIF Falcon
Falcon Orthodontic Instruments	801-206T	COUSSINETS DE RECHANGE (1/4 po) POUR PINCE À RETIRER L'ADHÉSIF (8)
Falcon Orthodontic Instruments	801-207T	COUSSINETS DE RECHANGE (3/16 po) POUR DÉPOSE-BAGUE (6)
Falcon Orthodontic Instruments	801-207TT	COUSSINETS DE RECHANGE (1/4 po) POUR DÉPOSE-BAGUE (6)
Falcon Orthodontic Instruments	800-213B	Pince pour retirer les brackets à collage direct Flacon, lame
Instruments orthodontiques X7	400-099	Micro coupe-fil X7, diam. max. fil 0,012 po
Instruments orthodontiques X7	400-100	Coupe-fil pour extrémité distale X7, diam. max. fil 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-101	Coupe-fil pour extrémité distale X7, diam. max. fil 0,021 x 0,025 po – manche long
Instruments orthodontiques X7	400-103	Coupe-fil pour extrémité distale et coupe à ras X7, diam. max. fil 0,019 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-104	Micro coupe-fil pour tenon et ligature X7, diam. max. fil 0,012 po
Instruments orthodontiques X7	400-105	Micro coupe-fil pour tenon et ligature X7, diam. max. fil 0,012 po
Instruments orthodontiques X7	400-106	Coupe-fil multi-usage X7, diam. max. fil 0,015 po
Instruments orthodontiques X7	400-107	Coupe-fil pour fil dur X7, diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-108	Micro coupe-fil pour tenon et ligature X7, angle de 15 degrés, diam. max. fil 0,012 po
Instruments orthodontiques X7	400-109	Pince bec d'oiseau long X7, effilé, diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-110	Pince bec d'oiseau X7, diam. max. 0,030 po
Instruments orthodontiques X7	400-111	Pince bec d'oiseau avec mâchoire tranchante X7, diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-114	Petite pince de Weingart X7

Instruments orthodontiques X7	400-115	Pince utilitaire standard de How X7
Instruments orthodontiques X7	400-116	Pince pour former des arcs rectangulaires X7, diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-117	Pince à trois becs X7, diam. max. 0,030 po
Instruments orthodontiques X7	400-120	Pince pour retirer les bagues postérieures X7, longue
Instruments orthodontiques X7	400-122	Pince de décollement angulée X7
Instruments orthodontiques X7	400-123	Pince de décollement X7
Instruments orthodontiques X7	400-124	Pince à retirer l'adhésif X7
Instruments orthodontiques X7	400-127	Pince à couder en distal X7, fil NiTi, diam. max. 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-128	Pince de profilage couronne/bague X7
Instruments orthodontiques X7	400-129	Pince de Jarabak X7, diam. max. 0,020 po
Instruments orthodontiques X7	400-130	Pince avec rainure pour fil léger X7, diam. max. 0,020 po
Instruments orthodontiques X7	400-131	Pince de Tweed pour former les boucles X7, diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-132	Pince pour former l'arc lingual X7
Instruments orthodontiques X7	400-133	Pince à former les arcs « Hollow Chop » X7, diam. max. 0,030 po
Instruments orthodontiques X7	400-134	Pince pour stop X7 (butée en V), diam. max. 0,021 x 0,025 po
Instruments orthodontiques X7	400-135	Pince à trois becs pour fil NiTi X7, diam. max. 0,020 po
Instruments orthodontiques X7	400-136	Pince bec d'oiseau (sans rainure) pour fil léger X7, diam. max. 0,020 po
Instruments orthodontiques X7	400-120T	Embouts (3/16 po) de rechange pour dépose-bague en postérieur X7, paquet de 6 (pour article 400-120)
Instruments orthodontiques X7	400-120TT	Embouts (1/4 po) de rechange pour dépose-bague en postérieur X7, paquet de 6 (pour article 400-120)
Instruments orthodontiques X7	400-124T	Embouts Teflon (1/4 po [6,35 mm]) de rechange pour pince à retirer l'adhésif X7, paquet de 6 (pour article 400-124)
Instruments orthodontiques X7	400-124TT	Lame de rechange pour pince à retirer l'adhésif X7 (non carbure) (pour article 400-124), paquet de 1
Instruments orthodontiques X7	400-103T	Inserts de rechange en silicone pour coupe-fil pour extrémité distale X7, 3/paquet (pour 400-103)