

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES

Ligatures et chaînettes élastomériques sans latex – D-00964 REV-0

• Ligatures élastomériques Power Sticks™

• Chaînette élastique Maximum™

Coordonnées du fabricant

Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U

Téléphone : +1-813-501-1650
Site Web : www.orthotechnology.com

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nom : Auxiliaires élastomériques sans latex

Description : Les ligatures et la chaînette sans latex assurent un maintien sûr de l'arc orthodontique dans la gorge du bracket et peuvent être utilisées seules ou en même temps. Elles présentent une élasticité élevée et un excellent rebond. Elles sont à utiliser sur un seul patient et disponibles en une variété de couleurs résistantes à la décoloration. Fabriquées en polyuréthane de qualité médicale. Les ligatures sans latex sont disponibles, soit par 24, soit par 10, sous forme de stick/support, afin de réduire les déchets et d'éviter la contamination croisée. La chaînette sans latex se présente sous forme de bobine et est disponible en chaînette continue, courte et longue.

TABLEAU DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE : [Consulter le lien de l'annexe ici.](#)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirer le produit de son emballage.
- 2a. Ligatures sans latex : Détacher une ligature à la fois du stick/support et la placer sur le fil et autour des ailettes du bracket à l'aide de l'instrument approprié, selon la formation orthodontique.
- 2b. Chaînettes sans latex : Sélectionner le type de chaînette requis pour le plan de traitement orthodontique et dérouler la longueur qui convient. Puis couper la chaînette et la placer sur le fil et autour des ailettes du bracket à l'aide de l'instrument approprié, selon la formation orthodontique.
3. Retirer les ligatures ou la chaînette sans latex à l'aide de l'instrument approprié afin de les changer, selon le plan de traitement.

aux instruments utilisés dans le traitement orthodontique.

- L'hygiène buccale revêt une importance particulière pour les patients immunodéprimés. Il faut surveiller de près l'hygiène buccale des patients immunodéprimés.
- Évaluer si un traitement orthodontique supplémentaire est souhaitable en présence d'une résorption radiculaire.
- Recommandé pour une utilisation avec la gamme de produits Ortho Technology.

INFORMATIONS GÉNÉRALES À L'INTENTION DU DENTISTE OU DE L'ORTHODONTISTE

- Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de traitement, évaluer la nécessité d'une coordination interdisciplinaire avec d'autres professionnels, tels que des orthophonistes, des oto-rhino-laryngologues, des médecins généralistes, des dentistes ou des orthodontistes.
- Une formation orthodontique aux interventions standards permettra de déterminer les instruments appropriés à utiliser lors de la pose et du retrait des élastiques.
- Suivre les instructions du fabricant relatives

COMPOSITION DES MATÉRIAUX :

- Ligatures sans latex : Polyuréthane Texin 985
- Chaînettes élastiques sans latex : Estane 2355-80AE

UTILISATEURS CONCERNÉS

Les ligatures et la chaînette sans latex sont fournies aux patients par un professionnel dentaire agréé ou un orthodontiste dans le cadre d'un traitement orthodontique.

POPULATION DE PATIENTS CONCERNÉE

Les ligatures et la chaînette sans latex sont utilisées par les orthodontistes.

UTILISATION PRÉVUE

Les ligatures et la chaînette sans latex sont utilisées afin de fixer un arc orthodontique dans la gorge d'un bracket orthodontique. De plus, la chaînette sans latex est utilisée pour fermer l'espace entre les dents.

Power Sticks et Maximum sont des marques de fabrique d'Ortho Technology, Inc.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES

Ligatures et chaînettes élastomériques sans latex – D-00964 REV-0

INDICATIONS D'UTILISATION

Les ligatures et la chaînette sans latex sont utilisées par les orthodontistes pour fixer un arc orthodontique dans la fente du bracket pendant un traitement orthodontique.

LIMITES

Au fil du temps, les ligatures et la chaînette sans latex perdent leur élasticité et elles doivent être changées selon un calendrier régulier tel que prescrit par un orthodontiste.

CONTRE-INDICATIONS

- Toute maladie ou tout trouble sous-jacent empêchant un traitement orthodontique.

AVERTISSEMENTS

- Une rupture pourrait causer une irritation des tissus mous.

RISQUES RÉSIDUELS

- Après la mise en place des ligatures ou de la chaînette, le patient peut ressentir une douleur au niveau des tissus mous.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou a été ouvert par mégarde.
- Ne pas utiliser les produits qui sont endommagés ou qui ne sont pas conformes aux spécifications de l'étiquetage.
- Utilisation sur ordonnance uniquement.

ATTENTION

- Surveiller l'incapacité ou la réticence du patient à coopérer/suivre le plan de traitement.
- Surveiller continuellement l'hygiène buccale du patient tout au long du traitement.

EFFETS SECONDAIRES

Une douleur peut être ressentie au niveau des tissus mous après le remplacement des ligatures ou de la chaînette sans latex.

AVANTAGES CLINIQUES

Les ligatures et la chaînette sans latex fixent l'arc orthodontique dans la gorge du bracket afin d'exprimer la prescription du bracket et traiter la malocclusion orthodontique. Par ailleurs, la chaînette sans latex ferme l'espace entre les dents.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Utilisées en cas de mauvais alignements des dents, de dents de travers ou de malocclusions.

RÉUTILISATION

Ne pas réutiliser : Conçues pour un seul patient au cours d'une seule intervention. La réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique peut exposer l'utilisateur et le patient à un risque de maladie ou de blessure.

ÉLIMINATION

Éliminer le produit conformément à la réglementation relative aux substances biologiques en vigueur.

SECTION DE SIGNALEMENT D'UN INCIDENT GRAVE

Si, pendant l'utilisation de cet appareil ou à la suite de son utilisation, un incident grave se produit ou un problème de performance du produit est observé, veuillez le signaler au fabricant ou à son représentant agréé ou à votre filiale locale, ainsi qu'à votre autorité nationale.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES**Ligatures et chaînettes élastomériques sans latex – D-00964 REV-0****COMMANDER UNE COPIE PAPIER GRATUITE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES (eIFU)**

Par Internet : Il faut avoir un accès Internet pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Aller sur **ifu.orthotechnology.com**.
3. Rechercher « Request a Printed Copy of the Instructions for Use » (demande d'une copie papier des instructions d'utilisation).
4. Remplir le formulaire en complétant les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où recevoir la copie papier des instructions d'utilisation. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.

Par téléphone : Il faut avoir accès à un téléphone pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Composer le **+1-813-501-1650** pendant les heures normales de l'Est listées ci-dessous :
Du lundi au jeudi – 9 h à 17 h 30
Vendredi – 9 h à 15 h
Samedi et dimanche – Fermé
3. Composer le numéro et suivre les instructions de l'opérateur.
4. Remplir les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où envoyer la copie papier des instructions d'utilisation du formulaire. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.

Pour le glossaire des symboles, se rendre sur : ifu.orthotechnology.com.



Fabriqué pour :
Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U.
1-813-501-1650 • www.orthotechnology.com














EC	REP
----	-----

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
Pays-Bas

ATTENTION : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu qu'à un dentiste ou un orthodontiste ou sur prescription de ce dernier.

Les informations contenues dans ces instructions d'utilisation sont jugées exactes. Toutefois, Ortho Technology, Inc. ne donne aucune garantie expresse ou implicite, concernant l'exhaustivité des informations dans toutes les conditions possibles. Toujours prendre des précautions de sécurité raisonnables.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

SYMBOLE	ÉNONCÉ DU SYMBOLE	DESCRIPTION DU SYMBOLE
	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical tel que défini dans les directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	Date de fabrication	Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.
	Numéro de lot	Indique le numéro de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	Numéro de catalogue	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
	Ne pas réutiliser.	Indique un dispositif médical à usage unique, conçu pour un seul patient au cours d'une seule intervention.
	Consulter les instructions d'utilisation	Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions d'utilisation.
	Attention	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation afin d'obtenir des informations de mises en garde importantes telles que des avertissements et des précautions qui ne peuvent, pour diverses raisons, être présentées sur le dispositif médical lui-même.
	Dispositif médical	Indique que le produit est un dispositif médical.
	Sur ordonnance uniquement	Attention : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur prescription de celui-ci.
	Conformité européenne	Le marquage CE indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Auxiliaires élastomériques sans latex – Numéros de référence

Ortho Technology, Inc.

1 Southern Court, West Columbia, SC 29169 É.-U.

Site Web : www.orthotechnology.com

Dernière mise à jour : 14/01/2022

Nom du produit	RÉF.	Description du produit
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-000S	Assortiment de couleurs Power Sticks, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-001S	Power Sticks, gris, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-002S	Power Sticks, transparent, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-004S	Power Sticks, bleu roi, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-005S	Power Sticks, bleu clair, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-006S	Power Sticks, pourpre, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-007S	Power Sticks, lavande, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-008S	Power Sticks, rouge, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-009S	Power Sticks, marron, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-010S	Power Sticks, noir, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-011S	Power Sticks, blanc, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-012S	Power Sticks, jaune, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-013S	Power Sticks, rose, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-014S	Power Sticks, aqua, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-015S	Power Sticks, vert néon, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-016S	Power Sticks, vert clair, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-017S	Power Sticks, vert foncé, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-018S	Power Sticks, orange, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-019S	Power Sticks, bleu sarcelle, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-020S	Power Sticks, argent métallique, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-026S	Power Sticks, fuchsia, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-027S	Power Sticks, turquoise, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-029S	Power Sticks, violet, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-030S	Power Sticks, bleu marine, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-033S	Power Sticks, bleu cobalt, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-060S	Power Sticks, rose fluo, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-070S	Power Sticks, bleu ciel, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-071S	Power Sticks, perlé, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	404-072S	Power Sticks, bleu perlé, 1 008/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-001	Mini Power Stick, gris, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-002	Mini Power Stick, transparent, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-004	Mini Power Stick, bleu roi, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-005	Mini Power Stick, bleu clair, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-006	Mini Power Stick, pourpre, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-007	Mini Power Stick, lavande, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-008	Mini Power Stick, rouge, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-009	Mini Power Stick, marron, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-010	Mini Power Stick, noir, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-011	Mini Power Stick, blanc, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-012	Mini Power Stick, jaune, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-013	Mini Power Stick, rose, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-014	Mini Power Stick, aqua, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-015	Mini Power Stick, vert néon, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-016	Mini Power Stick, vert clair, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-017	Mini Power Stick, vert foncé, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-018	Mini Power Stick, orange, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-019	Mini Power Stick, bleu sarcelle, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-020	Mini Power Stick, argent métallique, 1 000/paquet, 0,120 po

Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-026	Mini Power Stick, fuchsia, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-027	Mini Power Stick, turquoise, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-029	Mini Power Stick, violet, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-030	Mini Power Stick, bleu marine, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-033	Mini Power Stick, bleu cobalt, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-060	Mini Power Stick, rose fluo, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-070	Mini Power Stick, bleu ciel, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-071	Mini Power Stick, perlé, 1 000/paquet, 0,120 po
Ligatures élastomériques Power Sticks™	407-072	Mini Power Stick, bleu perlé, 1 000/paquet, 0,120 po
Chaînette élastique Maximum™	430-101	Chaînette élastique continue, gris, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-102	Chaînette élastique continue, transparent, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-104	Chaînette élastique continue, bleu, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-105	Chaînette élastique continue, bleu clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-106	Chaînette élastique continue, pourpre, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-107	Chaînette élastique continue, lavande, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-108	Chaînette élastique continue, rouge, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-109	Chaînette élastique continue, marron, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-110	Chaînette élastique continue, noir, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-111	Chaînette élastique continue, blanc, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-112	Chaînette élastique continue, jaune, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-113	Chaînette élastique continue, rose, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-114	Chaînette élastique continue, aqua, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-115	Chaînette élastique continue, vert néon, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-116	Chaînette élastique continue, vert clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-117	Chaînette élastique continue, vert foncé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-118	Chaînette élastique continue, orange, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-119	Chaînette élastique continue, bleu sarcelle, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-120	Chaînette élastique continue, argent métallique, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-126	Chaînette élastique continue, fuchsia, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-127	Chaînette élastique continue, turquoise, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-129	Chaînette élastique continue, violet, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-130	Chaînette élastique continue, bleu marine, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-133	Chaînette élastique continue, bleu cobalt, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-160	Chaînette élastique continue, rose fluo, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-170	Chaînette élastique continue, bleu ciel, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-171	Chaînette élastique continue, perlé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	430-172	Chaînette élastique continue, bleu perlé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-101	Chaînette élastique courte, gris, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-102	Chaînette élastique courte, transparent, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-104	Chaînette élastique courte, bleu roi, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-105	Chaînette élastique courte, bleu clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-106	Chaînette élastique courte, pourpre, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-107	Chaînette élastique courte, lavande, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-108	Chaînette élastique courte, rouge, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-109	Chaînette élastique courte, marron, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-110	Chaînette élastique courte, noir, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-111	Chaînette élastique courte, blanc, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-112	Chaînette élastique courte, jaune, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-113	Chaînette élastique courte, rose, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-114	Chaînette élastique courte, aqua, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-115	Chaînette élastique courte, vert néon, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-116	Chaînette élastique courte, vert clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-117	Chaînette élastique courte, vert foncé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-118	Chaînette élastique courte, orange, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-119	Chaînette élastique courte, bleu sarcelle, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-120	Chaînette élastique courte, vert métallique, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-126	Chaînette élastique courte, fuchsia, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-127	Chaînette élastique courte, turquoise, 15 pi/bobine

Chaînette élastique Maximum™	440-129	Chaînette élastique courte, violet, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-130	Chaînette élastique courte, bleu marine, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-133	Chaînette élastique courte, bleu cobalt, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-160	Chaînette élastique courte, rose fluo, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-170	Chaînette élastique courte, bleu ciel, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-171	Chaînette élastique continue, perlé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	440-172	Chaînette élastique continue, bleu perlé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-101	Chaînette élastique longue, gris, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-102	Chaînette élastique longue, transparent, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-104	Chaînette élastique longue, bleu roi, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-105	Chaînette élastique longue, bleu clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-106	Chaînette élastique longue, pourpre, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-107	Chaînette élastique longue, lavande, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-108	Chaînette élastique longue, rouge, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-109	Chaînette élastique longue, marron, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-110	Chaînette élastique longue, noir, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-111	Chaînette élastique longue, blanc, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-112	Chaînette élastique longue, jaune, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-113	Chaînette élastique longue, rose, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-114	Chaînette élastique longue, aqua, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-115	Chaînette élastique longue, vert néon, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-116	Chaînette élastique longue, vert clair, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-117	Chaînette élastique longue, vert foncé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-118	Chaînette élastique longue, orange, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-119	Chaînette élastique longue, bleu sarcelle, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-120	Chaînette élastique longue, argent métallique, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-126	Chaînette élastique longue, fuchsia, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-127	Chaînette élastique longue, turquoise, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-129	Chaînette élastique longue, violet, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-130	Chaînette élastique longue, bleu marine, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-133	Chaînette élastique longue, bleu cobalt, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-160	Chaînette élastique longue, rose fluo, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-170	Chaînette élastique longue, bleu ciel, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-171	Chaînette élastique longue, perlé, 15 pi/bobine
Chaînette élastique Maximum™	450-172	Chaînette élastique longue, bleu perlé, 15 pi/bobine