

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Tubes buccaux orthodontiques – D-00974 REV-0

- Tubes buccaux autoligaturants Lotus Plus® DS
- Tubes buccaux TruFit™ 2.0
- Tubes buccaux Votion®

COORDONNÉES DU FABRICANT

Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U.

Téléphone : +1-813-501-1650
Site Web : www.orthotechnology.com

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nom : Tubes buccaux orthodontiques

Description : Les tubes buccaux orthodontiques sont conçus pour être collés sur la dent. Les tubes buccaux orthodontiques sont indiqués pour servir d'interface entre la dent et l'arc orthodontique pour corriger les malocclusions ou fournir un ancrage pour d'autres appareils orthodontiques, tel que prescrit par un orthodontiste. Les tubes buccaux orthodontiques sont vendus par paquet de dix. Les tubes buccaux orthodontiques sont à usage unique. Ils sont fournis non stériles et ne requièrent aucun traitement avant usage.

TABLEAU DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE : [Consulter le lien de l'annexe ici.](#)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les tubes buccaux orthodontiques ne doivent être utilisés (ou prescrits au patient) que par des professionnels dentaires agréés ou des orthodontistes pendant un traitement orthodontique.

1. Retirer le produit de son emballage.
2. Utiliser un adhésif conventionnel pour bracket et suivre les instructions du fabricant.
3. Placer le tube buccal à l'aide de l'instrument qui convient.
4. Retirer l'excès de ciment autour du tube buccal et de la surface de la dent.
5. Laisser polymériser selon les instructions du fabricant de l'adhésif.
6. Placer et ligaturer le ou les arcs selon le plan de traitement.

Instructions pour décoller les tubes buccaux orthodontiques

Consulter les instructions de décollement en cliquant sur [ce lien](#).

Nous offrons les types de tubes buccaux orthodontiques suivants :

Tubes buccaux orthodontiques traditionnels

- Marques :
 - Tubes buccaux à coller TruCast™
 - Tubes buccaux à coller TruFit®
 - Tubes buccaux à souder TruFit®
 - Tubes buccaux à coller Votion®
- Les tubes buccaux à coller traditionnels utilisent un tube convertible ou non convertible traditionnel pour maintenir l'arc orthodontique en place dans la gorge du tube buccal. Une option à souder existe pour certains tubes buccaux à coller.

Tubes buccaux orthodontiques autoligaturants

- Marques :
 - Tubes buccaux autoligaturants Lotus Plus® DS
- Les tubes buccaux orthodontiques autoligaturants sont dotés d'une glissière, d'un clapet ou d'un clip qui s'ouvre pour permettre l'insertion de l'arc orthodontique dans la gorge du tube buccal, puis se referme pour le maintenir en place. Pour nos tubes buccaux autoligaturants, un instrument spécial est nécessaire pour ouvrir la glissière, le clapet ou le clip :
 - Pour les tubes buccaux autoligaturants Lotus Plus® DS, utiliser la clé Lotus Plus® DS (article n° OT-2108)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Tubes buccaux orthodontiques – D-00974 REV-0
**INFORMATIONS GÉNÉRALES À L'INTENTION
DU DENTISTE OU DE L'ORTHODONTISTE**

- Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de traitement, et avant la mise en place de l'appareil, évaluer la nécessité d'une coordination interdisciplinaire avec d'autres professionnels, tels que des orthophonistes, des oto-rhino-laryngologues, des médecins généralistes, des dentistes ou des orthodontistes.
- Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de tout agent de collage orthodontique, instrument ou autre matériau, dans le traitement orthodontique.
- Une formation orthodontique aux interventions standards permettra de déterminer quels sont les instruments appropriés à utiliser lors de la pose et du retrait des appareils.
- Ne pas toucher les surfaces de collage avec les doigts nus, car le film gras présent sur la peau peut diminuer l'adhérence.
- L'hygiène buccale revêt une importance particulière pour les patients immunodéprimés. Il faut surveiller de près l'hygiène buccale des patients immunodéprimés.
- Évaluer si un traitement orthodontique supplémentaire est souhaitable en présence d'une résorption radiculaire.
- Recommandé pour une utilisation avec la gamme de produits Ortho Technology.

Composition des matériaux :

Marques de tubes buccaux					
Tubes buccaux à coller Lotus Plus® DS	-	Clip Lotus Plus® DS	-	Lotus Plus® DS	-
Tubes buccaux à coller TruFit™ 2.0	TruFit™ 2.0	-	TruFit™ 2.0	TruFit™ 2.0	TruFit™ 2.0 (convertible)
Tubes buccaux à souder TruFit™ 2.0	-	-	TruFit™ 2.0	TruFit™ 2.0	TruFit™ 2.0 (convertible)
Tubes buccaux à coller Votion®	Votion®	-	Votion®	Votion®	Votion® (convertible)
Élément	Pâte à braser Bni5 (CNG-8100)	Nickel-titane	Acier inoxydable 316	Acier inoxydable 17-4	Acier inoxydable T302
C (carbone)	-	0,5 % max	0,08 % max.	0,07 % max.	≤ 0,12 %
Co (cobalt)		0,5 % max			
Cr (chrome)	0 à 24 %	0,010 % max.	16 à 18 %	15 à 17,5 %	17,00 à 19,00 %
Cu (cuivre)	-	0,010 % max.	-	3 à 5 %	-
Éthylène glycol	< 25 %	-	-	-	-
Fe (fer)	0 à 5 %	0,05 % max.	Équilibre	Équilibre	Équilibre
Mn (manganèse)	-	-	2,00 % max.	1,00 % max.	≤ 2,00 %
Mo (molybdène)	-	-	2 à 3 %	-	-
N (azote)	-	-	0,10 % max.	-	≤ 0,10 %
Nb (niobium)	-	0,025 % max.	-	0,15 à 0,45 %	-
Ni (nickel)	30 à 90 %	54,5 à 57,0 %	10,0 à 14,0 %	3,0 à 5,0 %	8,00 à 10,00 %
P (phosphore)	-	-	0,045 % max.	0,04 % max.	≤ 0,045 %
Si (silicium)	1 à 15 %	-	0,75 % max.	1,00 % max.	≤ 1,00 %
Ti (titane)	-	Équilibre	-	-	-
N+O (azote + oxygène)	-	0,05 % max.	-	-	-
H (hydrogène)	-	0,005 % max.	-	-	-

* Ces produits contiennent du nickel et du chrome et ne doivent pas être utilisés chez les personnes présentant une hypersensibilité allergique connue à ces métaux.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Tubes buccaux orthodontiques – D-00974 REV-0

UTILISATEURS CONCERNÉS

Les tubes buccaux orthodontiques ne doivent être utilisés (ou prescrits au patient) que par des professionnels dentaires agréés ou des orthodontistes pendant un traitement orthodontique.

POPULATION DE PATIENTS CONCERNÉE

Les dispositifs peuvent être utilisés sur tout patient envisageant un traitement orthodontique.

UTILISATION PRÉVUE

Les tubes buccaux orthodontiques sont utilisés en conjonction avec d'autres appareils orthodontiques pour corriger les malocclusions orthodontiques et pour améliorer l'esthétique du patient au cours d'un traitement orthodontique.

INDICATIONS D'UTILISATION

Les tubes buccaux orthodontiques sont indiqués pour servir d'interface entre la dent et l'arc orthodontique pour corriger les malocclusions, tel que prescrit par un orthodontiste.

CONTRE-INDICATIONS

Ils sont contre-indiqués chez les patients présentant une hypersensibilité allergique au nickel ou au chrome.

AVERTISSEMENTS

- Les tubes buccaux peuvent contenir des métaux qui peuvent produire de la chaleur et des artefacts d'image au niveau ou à proximité du dispositif lors d'imagerie par résonance magnétique.
- Ce produit peut contenir du cobalt, produit chimique reconnu en Europe comme cancérigène.
- Ce produit contient du nickel et du chrome ; il ne doit pas être utilisé chez les individus présentant une hypersensibilité allergique connue à ces métaux.



Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le cobalt, le nickel et le chrome qui sont reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes. Pour plus de renseignements, consulter le www.P65Warnings.ca.gov.

RISQUES RÉSIDUELS

- Dégradation de l'émail
- Apparition de taches blanches
- Douleur ressentie au niveau des tissus mous
- Résorption radiculaire
- Mouvement des dents après traitement

PRÉCAUTIONS

- La durée de vie du produit est de trois ans après la date de fabrication.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou a été ouvert par mégarde.
- Ne pas utiliser les produits qui sont endommagés ou qui ne sont pas conformes aux spécifications de l'étiquetage.

ATTENTION

- Si le patient présente une réaction allergique, retirer immédiatement le tube buccal et conseiller au patient de consulter un médecin.

EFFETS SECONDAIRES

Bien que peu fréquent, l'utilisation des tubes buccaux orthodontiques peut entraîner des effets secondaires tels que :

- Traitement différé
- Lésion des tissus mous
- Déminéralisation de l'émail
- Prolongation de la durée du traitement
- Inflammation des gencives, caries, complications parodontales à l'intérieur de la cavité buccale
- Réaction négative du patient – allergie

AVANTAGES CLINIQUES

Les avantages cliniques attendus des tubes buccaux orthodontiques sont une interface sûre et efficace entre la dent et l'arc orthodontique pour le mouvement des dents individuelles dans la correction des malocclusions telles que diagnostiquées par les professionnels dentaires agréés ou les orthodontistes pendant un traitement orthodontique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION**Tubes buccaux orthodontiques – D-00974 REV-0****CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE**

Les tubes buccaux orthodontiques sont collés sur les dents et servent d'intermédiaire entre les dents et un fil orthodontique ; ils sont utilisés conjointement avec d'autres appareils orthodontiques et d'autres accessoires pour corriger les malocclusions pendant un traitement orthodontique.

RÉUTILISATION

Ne pas réutiliser : Conçu pour un seul patient au cours d'une seule intervention. La réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique peut exposer l'utilisateur et le patient à un risque de maladie ou de blessure.

ÉLIMINATION

Éliminer le produit conformément à la réglementation relative aux substances biologiques en vigueur.

SECTION DE SIGNALLEMENT D'UN INCIDENT GRAVE

Si, pendant l'utilisation de cet appareil ou à la suite de son utilisation, un incident grave se produit ou un problème de performance du produit est observé, veuillez le signaler au fabricant ou à son représentant agréé ou à votre filiale locale, ainsi qu'à votre autorité nationale.

COMMANDER UNE COPIE PAPIER GRATUITE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES (eIFU)

Par Internet : Il faut avoir un accès Internet pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Aller sur **ifu.orthotechnology.com**.
3. Rechercher « Request a Printed Copy of the Instructions for Use » (demande d'une copie papier des instructions d'utilisation).
4. Remplir le formulaire en complétant les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où recevoir la copie papier des instructions d'utilisation. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.

Par téléphone : Il faut avoir accès à un téléphone pour commander une copie papier gratuite :

1. Repérer le numéro [REF] sur l'emballage.
2. Composer le **+1-813-501-1650** pendant les heures normales de l'Est listées ci-dessous :
Du lundi au jeudi – 9 h à 17 h 30
Vendredi – 9 h à 15 h
Samedi et dimanche – Fermé
3. Composer le numéro et suivre les instructions de l'opérateur.
4. Remplir les champs du nom du produit, du numéro de [REF] et de l'adresse où envoyer la copie papier des instructions d'utilisation du formulaire. La copie papier des instructions d'utilisation sera livrée à l'adresse indiquée dans les sept jours civils sans frais supplémentaires.

.....
Pour le glossaire des symboles, se rendre sur : ifu.orthotechnology.com.
.....



Fabriqué pour :
Ortho Technology, Inc.
1 Southern Ct.
West Columbia, SC 29169 É.-U.
1-813-501-1650 • www.orthotechnology.com













EC	REP
----	-----

CE
1639
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
Pays-Bas

.....
ATTENTION : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu qu'à un dentiste ou un orthodontiste ou sur prescription de ce dernier.
.....

Les informations contenues dans ces instructions d'utilisation sont jugées exactes. Toutefois, Ortho Technology, Inc. ne donne aucune garantie expresse ou implicite, concernant l'exhaustivité des informations dans toutes les conditions possibles. Toujours prendre des précautions de sécurité raisonnables.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

SYMBOLE	ÉNONCÉ DU SYMBOLE	DESCRIPTION DU SYMBOLE
	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical tel que défini dans les directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	Date de fabrication	Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.
	Numéro de lot	Indique le numéro de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	Numéro de catalogue	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
	Ne pas réutiliser.	Indique un dispositif médical à usage unique, conçu pour un seul patient au cours d'une seule intervention.
	Consulter les instructions d'utilisation	Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions d'utilisation.
	Attention	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation afin d'obtenir des informations de mises en garde importantes telles que des avertissements et des précautions qui ne peuvent, pour diverses raisons, être présentées sur le dispositif médical lui-même.
	Dispositif médical	Indique que le produit est un dispositif médical.
	Sur ordonnance uniquement	Attention : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur prescription de celui-ci.
	Conformité européenne	Le marquage CE indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
	Dangereux en environnement de résonance magnétique	Un article qui présente des risques inacceptables pour le patient, le personnel médical ou d'autres personnes dans l'environnement de la résonance magnétique.

Tubes buccaux orthodontiques – Numéros de référence

Ortho Technology, Inc.

1 Southern Court, West Columbia, SC 29169 É.-U.

Site Web : www.orthotechnology.com

Dernière mise à jour : 02/06/2022

Nom du produit	RÉF.	Description du produit
Tubes buccaux à coller Votion	351-11-1620	TBS SD6 NC C-14 A0 DD14 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-11-2620	TBS SG6 NC C-14 A0 DD14 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-11-3620	TBS ID6 NC C-25 A0 DD4 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-11-4620	TBS IG6 NC C-25 A0 DD4 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-12-1620	TBS SD6 NC C-14 A0 DD14 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-12-2620	TBS SG6 NC C-14 A0 DD14 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-12-3620	TBS ID6 NC C-25 A0 DD4 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-12-4620	TBS IG6 NC C-25 A0 DD4 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-21-1620	TBS SD6 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-21-2620	TBS SG6 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-21-3620	TBS ID6 NC C-20 A0 DD0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-21-4620	TBS IG6 NC C-20 A0 DD0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-22-1620	TBS SD6 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-22-2620	TBS SG6 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-22-3620	TBS ID6 NC C-20 A0 DD0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller Votion	351-22-4620	TBS IG6 NC C-20 A0 DD0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-11-1620	Mini TBS SD7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-11-2620	Mini TBS SG7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-11-3620	Mini TBS ID7 NC C-25 A0 DD0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-11-4620	Mini TBS IG7 NC C-25 A0 DD0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-12-1620	Mini TBS SD7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-12-2620	Mini TBS SG7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-12-3620	Mini TBS ID7 NC C-25 A0 DD0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-12-4620	Mini TBS IG7 NC C-25 A0 DD0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-21-1620	Mini TBS SD7 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-21-2620	TBS SG7 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-21-3620	Mini TBS ID7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-21-4620	Mini TBS IG7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,018 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-22-1620	Mini TBS SD7 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-22-2620	Mini TBS SG7 NC C-14 A0 DD10 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-22-3620	Mini TBS ID7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Mini tubes buccaux à coller Votion	352-22-4620	Mini TBS IG7 NC C-10 A0 D0 CD Votion™, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1020	TBS Roth SD6/7 NC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1610	TBS Roth SD6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1631	TBD Roth SD6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1652	TBT Roth SD6 CONV Masque-OCC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1671	TBC Roth SD6 CONV Masque-GIN C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1672	TBCO Roth SD6 CONV Masque-OCC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-1682	TBCO Roth SD6 NC Masque-OCC C-10 DD8 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2020	TBS Roth SG6/7 NC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2610	TBS Roth SG6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2631	TBD Roth SG6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2652	TBT Roth SG6 CONV Masque-OCC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2671	TBC Roth SG6 CONV Masque-GIN C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2672	TBCO Roth SG6 CONV Masque-OCC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-11-2682	TBCO Roth SG6 NC Masque-OCC C-10 DD8 à souder TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-12-1020	TBS Roth SD6/7 NC C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-12-1610	TBS Roth SD6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à souder TruFit 2.0	490-12-1631	TBD Roth SD6 CONV C-10 DD10 à souder TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)

Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-1020	TBS SE SD6/7 NC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-1023	TBS SE SD6/7 NC C0 D0 CD TS TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-1672	TBCO MC SD6 CONV Masque-OCC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-1682	TBCO SE SD6 NC Masque-OCC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-2020	TBS SE SG6/7 NC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-2023	TBS SE SG6/7 NC C0 D0 CD TS TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-2672	TBCO MC SG6 CONV Masque-OCC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-2682	TBCO SE SG6 NC Masque-OCC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-3020	TBS SE ID6/7 NC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-3023	TBS SE ID6/7 NC C0 D0 CD TS TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-4020	TBS SE IG6/7 NC C0 D0 CD TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-52-4023	TBS SE IG6/7 NC C0 D0 CD TS TruFit 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-3020	TBS Roth ID6/7 NC C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-3610	TBS Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-3631	TBD Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-3691	TBL Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-4020	TBS Roth IG6/7 NC C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-4610	TBS Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-4631	TBD Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-91-4691	TBL Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,018 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-3020	TBS Roth ID6/7 NC C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-3610	TBS Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-3631	TBD Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-3691	TBL Roth ID6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-4020	TBS Roth IG6/7 NC C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-4610	TBS de Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-4631	TBD Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)
Tubes buccaux à coller TruFit 2.0	492-92-4691	TBL Roth IG6 CONV C-25 DD4 CD TruFit™ 2.0, 0,022 po (10/paquet)